



Representation in Scandinavia

OPUS 2



SPOLE

TILL/FRÅN

KONTROLL-LAMPA

Snabb blinkning = felindikering. Ibland kan felet avhjälpas genom att stänga av/sätta på talprocessorn.

Regelbunden blinkning = byt batterier.

Kort blink =

Signal från justeringskontrollen mottagen och accepterad

ÅTERGÅ TILL GRUNDINSTÄLLNING

KONTROLL LAMPOR

Höger resp. vänster lampa tänds då kontrollen sänder till Höger resp Vänster processor

Mittlampan blinkar = tangentbordet är låst

Mittlampan blinkar 3 ggr = byt batteri

MIKROFONENS KÄNSLIGHET


PROGRAMVAL

1 - 4

VOLYM + -

VAL AV LJUDKÄLLA
M, MT eller T

VAL AV PROCESSOR
Vänster, Höger eller båda

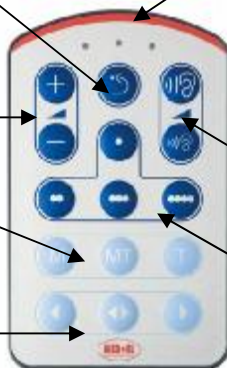


FUNKTIONSKONTROLL MED TESTPLATTA

Gör så här:

- Ta av processorn från sin plats bakom örat.
- Ställ Processorn i läge Till
- Ljuda (t.ex. ba-ba-ba-)
- Fäst processorns spole mot testplattan (medan du ljudar)
- Kontrollera att den röda lampan blinkar i takt med ljudet

Om den röda lampan inte blinkar:

- Kontrollera batterierna
- Prova med reservsladden
- Prova med annan batterihållare

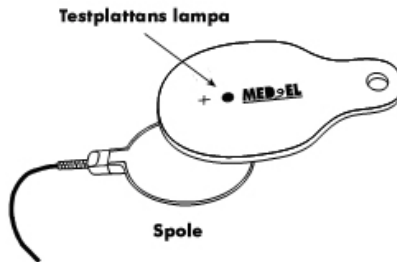

MED-EL representeras i Skandinavien av

Möllerström Medical AB

Slagthuset

SE- 211 20 Malmö, Sverige

Tel. 040-17 63 50

Fax. 040-176359

www.mollerstrommedical.com

info@mollerstrommedical.com