

# Lathund Felsökningsguide

## Hur man använder OPUS 2 FineTuners AUTOMATISKA KNAPPLÅS

### AKTIVERA det automatiska knapplåset

Den automatiska knapplåsfunktionen kan endast aktiveras när fjärrkontrollen är i programmeringsläge. Detta är inställt när den röda och de båda gula lamporna blinkar växelvis.

Gå in i FineTuners programmeringsläge genom att trycka <> under minst 5 sekunder. Tryck sedan in > medan indikatorlamporna blinkar.

Håll in under  
minst 5 sekunder

För aktivering,  
tryck medan  
lamporna blinkar

### AVAKTIVERA det automatiska knapplåset

Den automatiska knapplåsfunktionen kan endast avaktiveras när fjärrkontrollen är i programmeringsläge. Detta är inställt när den röda och de båda gula lamporna blinkar växelvis.


Gå in i FineTuners programmeringsläge genom att trycka <> under minst 5 sekunder. Tryck sedan in < medan indikatorlamporna blinkar.


Tryck två gånger.  
Håll den andra  
tryckningen under  
minst 5 sekunder

För avaktivering,  
tryck medan  
lamporna blinkar

### Användning av fjärrkontrollen med aktiverat automatlås

För att använda fjärrkontrollen när knapparna är låsta, tryck in den önskade funktionsknappen *två* gånger. Den första tryckningen låser upp knappen tillfälligt och den andra utför funktionen. Om ingen ytterligare knapp trycks in inom 10 sekunder, aktiveras knapplåset igen.

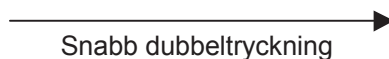

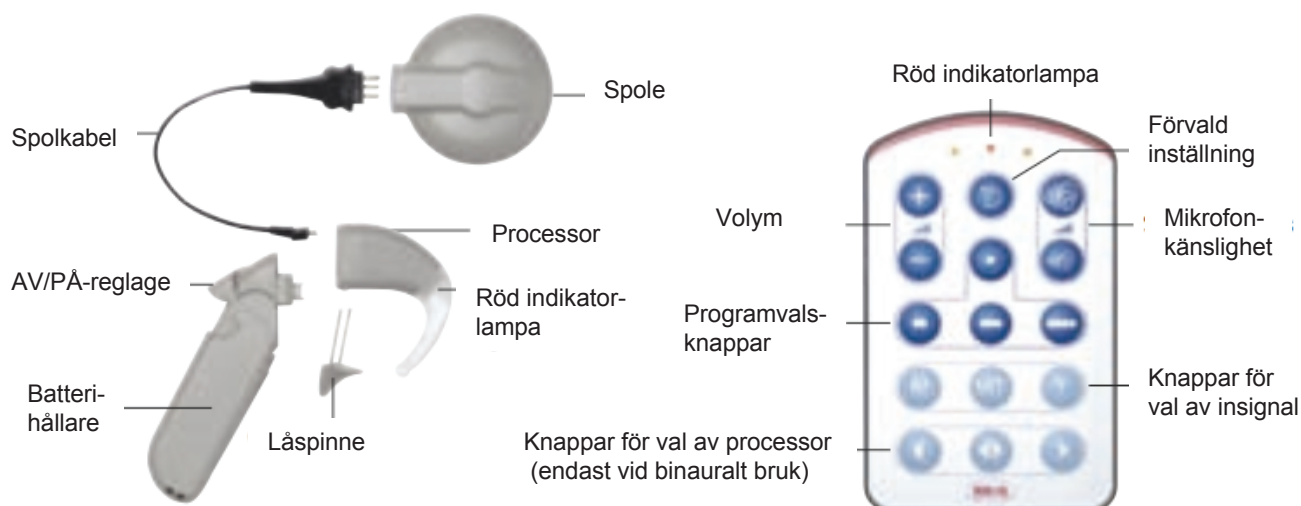

### OPUS 2 - Felindikation

Blinksekvens	Betydelse	Åtgärd	Anmärkning
c:a 2 sek	Elektronikfel eller tillfällig störning i processorns funktion.	Stäng av processorn Sätt på processorn igen.	Om blinkningen fortsätter måste processorn ersättas med annan.
c:a 2 sek	Det valda programläget är inte programmerat, eller ett programfel har uppstått	Välj ett annat programläge	Om blinkningen kvarstår bör processorn programmeras om på kliniken.
c:a 2 sek	Elektronik- eller programfel	Stäng av processorn Sätt på processorn igen.	Om blinkningen kvarstår måste processorn programmeras om.
c:a 2 sek	Elektronikfel eller tillfällig störning i processorns funktion.	Stäng av processorn Sätt på processorn igen.	

### OPUS 2 - Varningssignaler

Blinksekvens	Betydelse	Åtgärd	Anmärkning
c:a 1 sek	Batterierna är slut.	Stäng av processorn Byt batterier och slå på processorn igen.	Om processorn inte slås av, kommer lamporna att fortsätta blinka.
Fast lysande sken	Max- eller min-läge i volym eller sensitivitet uppnått.	Släpp knappen på FineTuner	

#### FineTuner - Svagt batteri

FineTuner kontrollerar sin egen batteristatus efter varje sändning till processorn. Om batteriet blir svagt kommer den röda indikatorlampan (i mitten) att blinka regelbundet i sekvenser om tre blinkningar.

## OPUS 2 - Processortestare

Problembeskrivning	Möjlig orsak	Åtgärd	Anmärkning
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testplattans lampa släckt</li> <li>• Indikatorlampan på OPUS 2 blinkar upp till fyra gånger efter påslag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolsladden inte korrekt ansluten</li> <li>• Defekt spole eller kabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kontrollera anslutningen eller testa med reservkabel.</li> <li>➤ Byt spolen</li> </ul>	Om problemet kvarstår, byt ut processorn
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testplattans lampa släckt</li> <li>• Indikatorlampan på OPUS 2 blinkar INTE efter påslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomma batterier</li> <li>• Fel på batterihållaren</li> <li>• Fel på spole</li> <li>• Fel på spolkabel, eller felaktigt ansluten spolkabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Byt batterier</li> <li>➤ Prova med annan batterihållare</li> <li>➤ Lossa spolen. Om indikatorlampan på OPUS 2 blinkar upp till fyra gånger efter påslag, byt ut spolen.</li> <li>➤ Lossa spolkabeln. Om indikatorlampan på OPUS 2 blinkar upp till fyra gånger efter påslag, byt ut kabeln.</li> </ul>	Om problemet kvarstår, byt ut processorn
Testplattans lampa lyser svagt och konstant	Fel på mikrofonen	➤ Kontrollera mikrofonen med mikrifontestutrustning	Om problemet kvarstår, byt ut processorn
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljudet från processorn är svagt eller dovt</li> <li>• Testplattans lampa lyser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrofonöppningen är tilltäppt (fukt)</li> <li>• Mikrofonen är defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Torka processorn</li> <li>➤ Kontrollera mikrofonen med mikrifontestutrustning</li> </ul>	Om problemet kvarstår, byt ut processorn

## OPUS 2 - FineTuner

Problembeskrivning	Möjlig orsak	Åtgärd	Anmärkning
OPUS 2 svarar inte på kommando från FineTuner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPUS 2 befinner sig utanför FineTuners räckvidd, (c:a 0,8 m)</li> <li>• Automatiskt knapplås aktiverat</li> <li>• Elektromagnetisk störning blockerar överföringen</li> <li>• OPUS 2 och FineTuner är inte synkroniserade</li> <li>• Lågt batteri i FineTuner</li> <li>• OPUS 2-kommandon är avstängda</li> <li>• Indikatorlampan i OPUS 2 är deaktiverad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Flytta närmare</li> <li>➤ Deaktivera automatiskt knapplås</li> <li>➤ Uppsök annan plats</li> <li>➤ Utför synkronisering</li> <li>➤ Byt batteri</li> <li>➤ Kontakta din klinik</li> <li>➤ Kontakta din klinik</li> </ul>	Om problemet kvarstår, byt ut FineTuner eller processorn